

Viera™

Breast ultrasound de **Clarius**®

Guía de inicio rápido

HOLOGIC®

 **clarius** ultrasound
anywhere



Para obtener soporte técnico:
**Póngase en contacto con el
soporte técnico de Hologic**



Le rogamos lea el Manual de usuario del escáner ultrasónico de Viera para consultar todas las instrucciones, el glosario de símbolos e información en torno a la seguridad.

1 Descargue la Clarius App en la App Store o en la Google Play Store




2 Inicie la Clarius App




3 Crear cuenta



 Si ya tiene una cuenta, inicie sesión con ella.


4 Coloque la batería

Cuando haya cargado la Clarius App en el dispositivo inteligente, retire la lengüeta protectora de la batería y coloque la batería por completo. La luz del escáner parpadeará en azul y después en verde; a continuación, se apagará. El escáner entra en modo de espera hasta que se inicie la aplicación.

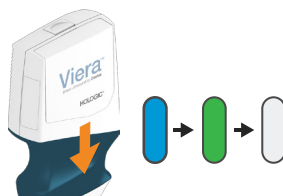

5 Asigne su escáner

Asegúrese de que el dispositivo inteligente está conectado a Internet. El escáner asignado aparecerá en la aplicación en un minuto aproximadamente.

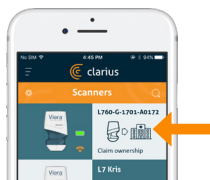

6 Cree o seleccione el centro médico

Cuando haya seleccionado el escáner, la aplicación le llevará a la creación o selección de un centro médico ya conectado con su cuenta.



7 Seleccione el escáner


Seleccione el nuevo escáner de la lista.



8

Observe la rueda de conexión

Cuando el estado de la rueda de conexión se haya completado, significa que la Clarius App está conectada al escáner.

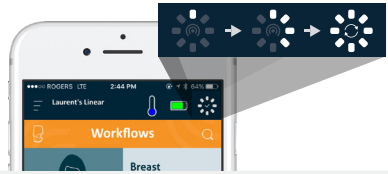

9

Cambie a la red Wi-Fi Direct del escáner


Tras la configuración inicial, el escáner Viera se conectará de forma automática al dispositivo inteligente la próxima vez que coloque la batería. Para lograr el mayor rendimiento, se recomienda un dispositivo inteligente compatible con una red wifi de 5 GHz.

iOS*

A partir de la versión iOS 11, se mostrará una pantalla cada vez que se encienda el escáner. Solo tiene que tocar el botón Unirse y se conectará el escáner.

Android

Se mostrará un mensaje en pantalla para confirmar la conexión automática.

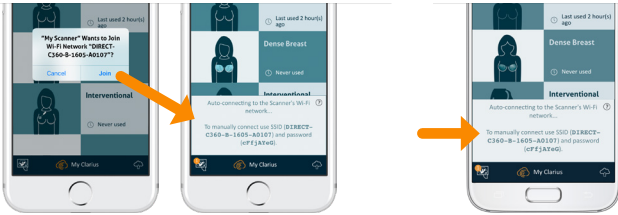

* **NOTA:** Para iOS 10 y versiones anteriores, los usuarios deben seguir el método de configuración manual que se explica en www.clarius.com/wifi. El iPhone 4s no es compatible con una red wifi de 5 GHz.




¿Problemas de conexión? Pruebe el método de configuración manual que se explica aquí: www.clarius.com/wifi


10

Inicie el escaneo

Seleccione el tipo de examen de la lista

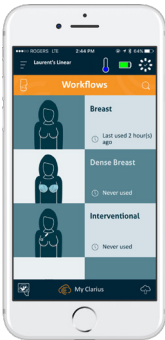

Introduzca los datos demográficos del paciente o vaya al siguiente paso

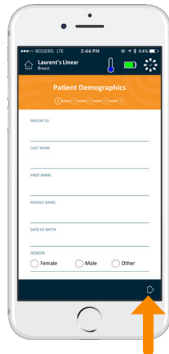


Pulse el símbolo del copo de nieve para ver la pantalla de obtención de imágenes en vivo



Conozca y aprenda las funciones básicas de escaneo en www.clarius.com/tutorials


Descargue actualizaciones

En algunos casos, el sistema le solicitará que actualice el software del escáner. Para continuar, solo tiene que pulsar **Actualizar**.

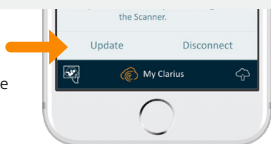

Durante una actualización

La luz del escáner primero parpadea en azul y después en púrpura mientras se actualiza el software. **No desenchufe la batería durante este proceso.**

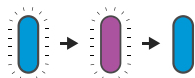

También se muestra un indicador de color púrpura en la parte superior derecha de la pantalla. Cuando haya finalizado la actualización, la luz del escáner se volverá azul y la conexión se restablecerá de forma automática.



Tras la actualización, puede que tenga que volver al paso 9 para restablecer la conexión.

Consejos rápidos

Busque en nuestra base de conocimiento consejos rápidos sobre la configuración y el uso del escáner Viera y Clarius Cloud.

www.clarius.com/faq

Dispositivos compatibles

El escáner Viera funciona con dispositivos iOS y Android. Para ver una lista de los dispositivos compatibles actualmente, vaya a:

www.clarius.com/devices

Manuales

Copia impresa

Para conseguir una copia impresa del Manual de usuario del escáner ultrasónico de Viera sin coste adicional o si tiene alguna pregunta sobre cualquier material del paquete, le rogamos se ponga en contacto con el Servicio técnico de Hologic.

Copia digital

La última versión del Manual de usuario del escáner ultrasónico de Viera está disponible en www.clarius.com/manuals. Descárguelo para su consulta en cualquier dispositivo.

Soporte técnico de Hologic

Centro de asistencia en EE. UU.

+1-877-371-4372

+1-781-999-7750

BreastHealth.Support@hologic.com

Centro de asistencia europea

+32 2 711 4545

BE-Techsupport@hologic.com

Centro de asistencia australiana

+1-800-264073

+612-9888-8000

anz.service@hologic.com

Fabricado por:

Hologic, Inc.

Sede central

250 Campus Drive

Marlborough, MA 01752 EE. UU.

Teléfono: +1.508.263.2900

www.hologic.com

Fabricado por:

Clarius Mobile Health

350-3605 Gilmore Way

Burnaby, BC, V5G4X5, Canadá

hello@clarius.com

Teléfono: +1.778.800.9975

www.clarius.com



Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida aquella que pueda ocasionar un funcionamiento no deseado. Se ha probado que este producto cumple con la directiva de CEM en condiciones que incluyeron el uso de dispositivos periféricos compatibles. Es importante que utilice dispositivos periféricos compatibles para reducir la posibilidad de ocasionar interferencias a radios, televisores y otros dispositivos electrónicos.



Para obtener soporte técnico:
Póngase en contacto con el soporte técnico de Hologic



Le rogamos lea el Manual de usuario del escáner ultrasónico de Viera para consultar todas las instrucciones, el glosario de símbolos e información en torno a la seguridad.