

Viera™

Breast ultrasound da **Clarius**®

Guia de início rápido

HOLOGIC®

 **clarius** ultrasound
anywhere



Para apoio técnico:
**Entre em contacto com o Apoio
técnico da Hologic**



Por favor, leia o Manual do Utilizador do Leitor de
Ultrassom Viera para obter instruções completas,
glossário de símbolos e informações de segurança.

1 Descarregue a App Clarius a partir da App Store ou da Google Play Store



2 Iniciar a aplicação da Clarius



3 Criar conta



i Se já tiver uma conta, inicie sessão com a conta existente.

4 Inserir a bateria

Após carregar a aplicação da Clarius para o seu dispositivo inteligente, remova a patilha do compartimento de bateria e reintroduza a bateria. A luz do ecógrafo piscará a azul, depois a verde e, por fim, desligará; o ecógrafo aguarda no modo de espera até que a aplicação seja iniciada.



5 Reclamar o ecógrafo

Certifique-se de que o seu dispositivo inteligente está ligado à internet. É necessário cerca de um minuto para que o seu ecógrafo apareça na aplicação.



6 Criar ou selecionar a instituição

Após reclamar o seu ecógrafo, a aplicação irá solicitar-lhe que crie uma nova instituição ou que selecione uma instituição que já esteja ligada à sua conta.



7 Selecionar ecógrafo


Selecione o novo ecógrafo na lista.



8

Observar o círculo de ligação

Quando o círculo de estado estiver completo, a aplicação da Clarius estará ligada ao ecógrafo.

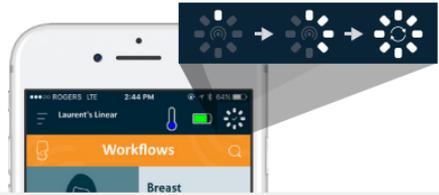
**9**

Voltar a ligar-se à rede Wi-Fi Direct do ecógrafo


Após a configuração inicial, o seu ecógrafo Viera irá ligar-se automaticamente ao seu dispositivo inteligente da próxima vez que inserir a bateria. Para melhor desempenho, recomenda-se a utilização de um dispositivo que suporte Wi-Fi de 5 GHz.

iOS*

O iOS 11 e as versões posteriores apresentam uma mensagem sempre que o ecógrafo é ligado. Basta tocar no botão Aderir e o seu ecógrafo ligar-se-á.

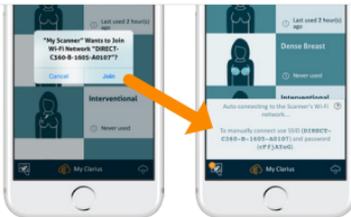**Android**

Será apresentada uma mensagem no ecrã para confirmar a ligação automática.

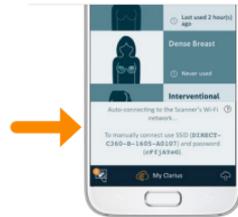

*NOTA: Para o iOS 10 ou anterior, os utilizadores devem utilizar o método de configuração manual descrito em www.clarius.com/wifi. O iPhone 4s não suporta Wi-Fi de 5 GHz.




Problemas com a ligação? Experimente o método de configuração manual descrito aqui: www.clarius.com/wifi

10

Iniciar a análise


Selecione o tipo de exame na lista

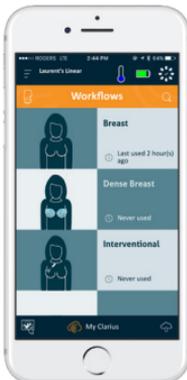

Introduza os dados demográficos do paciente ou avance para o próximo passo




Prima o botão de floco de neve para aceder ao ecrã de captura de imagens em tempo real

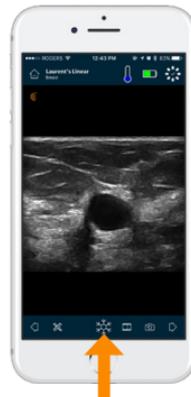

Saiba mais sobre as funções básicas de análise em www.clarius.com/tutorials


Transferir atualizações

Em alguns casos, o sistema irá solicitar-lhe que atualize o software do ecógrafo. Basta premir **Atualizar** para continuar.

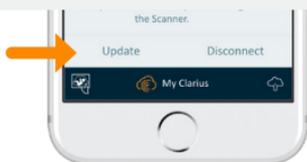

Durante uma atualização

A luz do ecógrafo começa a piscar a azul e pisca depois a roxo, enquanto o software está a atualizar. **Não desligue a bateria durante este período.**

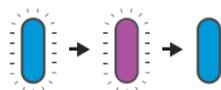

Também é apresentado um indicador roxo no canto superior direito do ecrã. Após concluir a atualização, a luz do ecógrafo passa a azul e a ligação é restabelecida automaticamente.



Após a atualização, pode ser necessário consultar novamente o passo 9 para restabelecer a ligação.

Sugestões rápidas

Procure sugestões rápidas na nossa base de conhecimentos de fácil utilização sobre como configurar e utilizar o ecógrafo Viera e a Clarius Cloud.

www.clarius.com/faq

Dispositivos suportados

O ecógrafo Viera é compatível com dispositivos iOS e Android. Para obter uma lista dos dispositivos suportados atualmente, visite:

www.clarius.com/devices

Manuais

Cópia Impressa

Para obter uma cópia impressa do Manual do Utilizador do Leitor de Ultrassom Viera sem custos adicionais, ou se tiver dúvidas em relação a quaisquer artigos contidos na embalagem, por favor, contacte o Apoio Técnico da Hologic.

Cópia Digital

A última versão do Manual do Utilizador do Leitor de Ultrassom Viera está disponível em www.clarius.com/manuals. Descarregue-a para a ver em qualquer dispositivo.

Apoio técnico da Hologic

Centro de apoio ao cliente nos EUA

+1-877-371-4372

+1-781-999-7750

BreastHealth.Support@hologic.com

Centro de apoio ao cliente na Europa

+32 2 711 4545

BE-Techsupport@hologic.com

Centro de apoio ao cliente na Austrália

+1-800-264073

+612-9888-8000

anz.service@hologic.com

Fabricado para:

Hologic, Inc.

Sede corporativa

250 Campus Drive

Marlborough, MA 01752 EUA

Telefone: +1.508.263.2900

www.hologic.com

Fabricado por:

Clarius Mobile Health

350-3605 Gilmore Way

Burnaby, BC, V5G4X5, Canadá

hello@clarius.com

Telefone: +1.778.800.9975

www.clarius.com



Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das regras da FCC. O funcionamento está sujeito à duas condições que se seguem: 1) este dispositivo não pode causar interferências danosas e 2) este dispositivo deve aceitar quaisquer interferências recebidas, incluindo interferências que possam provocar um funcionamento não desejado. Este dispositivo demonstrou estar em conformidade com a EMC sob condições que incluíram a utilização de dispositivos periféricos compatíveis. É importante que utilize dispositivos periféricos compatíveis para reduzir a possibilidade de causar interferências em rádios, televisões e outros dispositivos eletrónicos.



Para apoio técnico:
Entre em contacto com o Apoio técnico da Hologic



Por favor, leia o Manual do Utilizador do Leitor de Ultrassom Viera para obter instruções completas, glossário de símbolos e informações de segurança.