

Viera™

Breast ultrasound da **Clarius®**

Guia de início rápido

HOLOGIC®

 **clarius** ultrasound
anywhere



Para obter suporte técnico:
Entre em contato com o Suporte técnico da Hologic



Leia o Manual do Usuário do Viera Ultrasound Scanner para obter instruções completas, glossário de símbolos e informações de segurança.


1 Baixe o aplicativo Clarius pela App Store ou pela Google Play Store



2 Iniciar o aplicativo Clarius



3 Criar conta

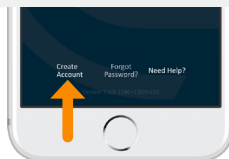

i Se você já tiver uma conta, faça login com a conta existente.


4 Introduzir a bateria

Após instalar o aplicativo Clarius no seu dispositivo inteligente, remova a patilha da bateria e reintroduza-a totalmente. A luz do scanner piscará em azul, depois em verde e, por fim, se desligará; o scanner aguarda no modo em espera até que o aplicativo seja iniciado.



5 Reclamar o seu scanner

Certifique-se de que o seu dispositivo inteligente esteja conectado à internet. Levará cerca de um minuto para que o seu scanner apareça no aplicativo.

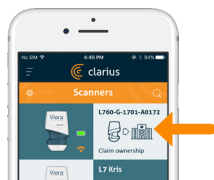


6 Criar ou selecionar instituição

Após reclamar o seu scanner, o aplicativo solicitará que você crie uma nova instituição ou selecione uma instituição que já esteja conectada à sua conta.



7 Selecionar scanner


Selecione o novo scanner na lista.

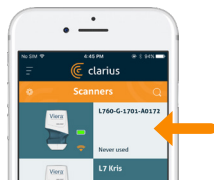

8

Observar o círculo de conexão de conexão

Quando o círculo de status estiver completo, o aplicativo Clarius estará conectado ao scanner.

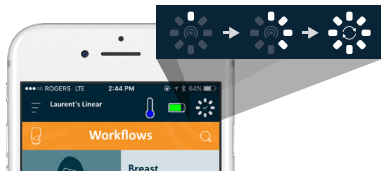


9

Reconectar à rede Wi-Fi Direct do scanner

Após a configuração inicial, o seu scanner Viera se conectará automaticamente ao seu dispositivo inteligente da próxima vez que você inserir a bateria. Para obter um melhor desempenho, é recomendado usar um dispositivo inteligente que suporte Wi-Fi de 5 GHz.


iOS*

O iOS 11 e as versões posteriores exibirão uma mensagem sempre que o scanner for ligado. Basta tocar no botão Join (Ingressar) e o scanner será conectado.

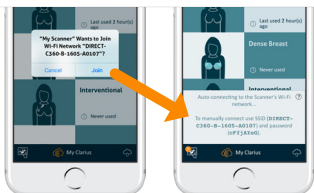

Android

Será exibida uma mensagem na tela para confirmar a conexão automática.

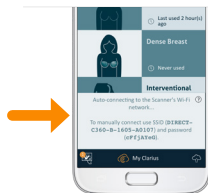

*OBSERVAÇÃO: Para o iOS 10 ou anterior, os usuários devem usar o método de configuração manual explicado em www.clarius.com/wifi. O iPhone 4s não suporta Wi-Fi de 5 GHz.




Problemas de conexão? Experimente o método de configuração manual explicado aqui: www.clarius.com/wifi


10

Iniciar varredura

Selecione o tipo de exame na lista.

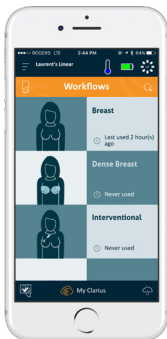

Introduza os dados demográficos do paciente ou avance para a próxima etapa.

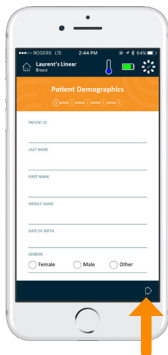


Pressione o botão de floco de neve para acessar a tela de aquisição de imagens em tempo real.



Saiba mais sobre as funções básicas de aquisição de imagens em www.clarius.com/tutorials


Baixar atualizações

Em alguns casos, o sistema solicitará que você atualize o software do seu scanner. Basta pressionar **Update** (Atualizar) para continuar.

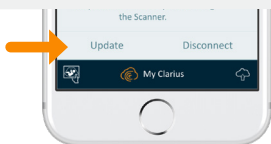

Durante uma atualização

A luz do scanner começa por piscar em azul e passa a roxo intermitente durante a atualização do software. **Não desligue o carregador da bateria durante esse tempo.**

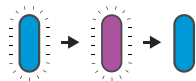

Também é apresentado um indicador roxo no canto superior direito da tela. Após a conclusão da atualização, a luz do scanner passará a azul e a conexão será restabelecida automaticamente.

i Após a atualização, poderá ser necessário consultar novamente a etapa 9 para restabelecer a conexão.

Dicas rápidas

Pesquise nossa base de dados de conhecimento de fácil utilização para obter dicas rápidas sobre como configurar e usar o scanner Viera e a Clarius Cloud.

www.clarius.com/faq

Dispositivos suportados

O scanner Viera é compatível com dispositivos iOS e Android. Para obter uma lista dos dispositivos suportados atualmente, visite:

www.clarius.com/devices

Manuais

Cópia impressa

Para obter uma cópia impressa do Manual do Usuário do Viera Ultrasound Scanner (Scanner de Ultrassonografia Viera) sem custo adicional, ou se tiver dúvidas sobre qualquer item do pacote, entre em contato com o Suporte Técnico da Hologic.

Cópia Digital

A versão mais recente do Manual do Usuário do Viera Ultrasound Scanner está disponível no site www.clarius.com/manuals. Baixe-a para visualizar em qualquer dispositivo.

Suporte técnico da Hologic

Central de suporte nos EUA

+1-877-371-4372

+1-781-999-7750

BreastHealth.Support@hologic.com

Central de suporte na Europa

+32 2 711 4545

BE-Techsupport@hologic.com

Central de suporte na Austrália

+1-800-264073

+612-9888-8000

anz.service@hologic.com

Fabricado para:

Hologic, Inc.

Sede corporativa

250 Campus Drive

Marlborough, MA 01752 EUA

Telefone: +1.508.263.2900

www.hologic.com

Fabricado por:

Clarius Mobile Health

350-3605 Gilmore Way

Burnaby, BC, V5G4X5, Canadá

hello@clarius.com

Telefone: +1.778.800.9975

www.clarius.com



Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das normas da FCC. A operação está sujeita às duas condições a seguir: (1) este dispositivo não pode causar interferências nocivas e (2) este dispositivo deve aceitar todas as interferências recebidas, incluindo interferências que possam causar uma operação indesejada. Este produto demonstrou estar em conformidade com a CEM em condições que incluam a utilização de dispositivos periféricos compatíveis. É importante que você utilize dispositivos periféricos compatíveis para diminuir a possibilidade de ocorrência de interferências em rádios, televisões e outros dispositivos eletrônicos.



Para obter suporte técnico:
Entre em contato com o Suporte técnico da Hologic



Leia o Manual do Usuário do Viera Ultrasound Scanner para obter instruções completas, glossário de símbolos e informações de segurança.